


- 使用用途**
- 医療従事者・患者・入居者の手の接触面に(ドアノブ、手すり、ベッド柵、機器外装等)
 - 処置室・ICU(集中治療室)・手術室・フロア・トイレ等の床に

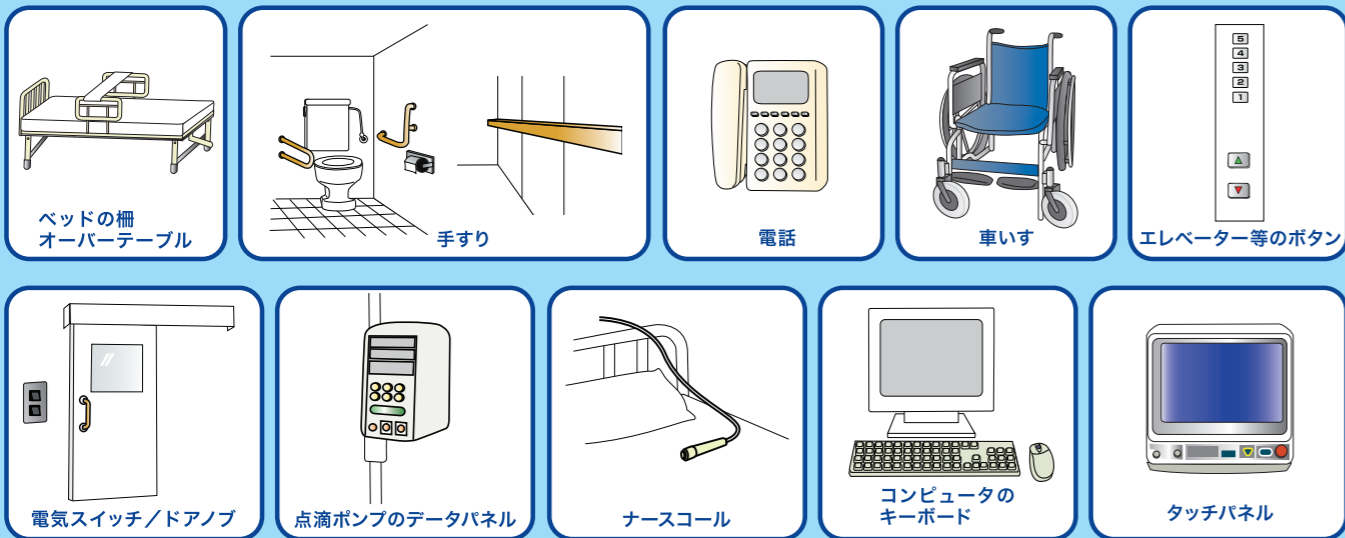

手の接触頻度の多い環境表面の清掃から、
体液・血液汚れまで
除菌と洗浄が一度にできる

除菌 洗浄 がこれ1枚で

医療施設用 **セイフキープ**
ペーパータイプ

注意事項

使えないもの

- 銅・真ちゅう・亜鉛・錫の金属製品
- 水がしみこむ白木・壁材・家具類
- ポリカーボネート
- ★アルミニウム、木材、合皮などは目立たない部分で影響がないことを確認してから使用する。

使用上の注意

- 取り扱い時には、手袋を使う。
- 用途外には使わない。
- 手、顔など身体や食器・食品には使用しない。
- 水に溶けないので、トイレに流さない。
- 効果が落ちるので、塩素系や酸素系漂白剤との併用はしない。
- 直射日光を避け、高温の所に置かない。
- 子供の手の届く所に置かない。
- 認知症の方などの誤食や他の事故を防ぐため、置き場所に注意する。
- 乾燥を避けるために、使用後は必ずフタを閉める。
- ★機器などに使用する場合は、機器の「取扱説明書」に従う。

梱内容

品名	目付 梱内容	サイズ(mm)・重量 (高さ×幅×奥行)	JANコード
セイフキープ (本体) [クロスの大きさ: 140mm×200mm]	80枚入 12本	個 170×107×107 335g 梱 189×450×336 4.4kg	4 901301 505958
セイフキープ (つめかえ用) [クロスの大きさ: 140mm×200mm]	80枚入 24本	個 170×83×65 261g 梱 191×540×300 7.0kg	4 901301 505965
セイフキープワイド (つめかえ用) [クロスの大きさ: 150mm×300mm]	300枚入 6袋	個 155×195×195 1575g 梱 194×616×390 10.6kg	4 901301 507150
セイフキープワイド (つめかえ容器)	4個	個 190×229×229 272g 梱 301×475×245 1.5kg	4 901301 507167
セイフキープワイド ピロータイプ [クロスの大きさ: 200mm×300mm]	35枚入 12袋	個 230×95×55 255g 梱 214×343×238 3.5kg	4 901301 509222

商品写真以外の画像に関して、
他の印刷物やWEBサイトなどでの無断使用を禁じます。

この販売レポートに記載したデータ等は、当社調査結果によるものです。
セイフキープは商標です。

お問い合わせ・ご注文は

花王プロフェッショナル・サービス株式会社



〒131-8501 東京都墨田区文花 2-1-3 ☎03(5630)9283



コンパクトなサイズで
いろいろな場所への
設置ができます



- 特長1 優れた除菌性能**
- 特長2 高い洗浄力**
- 特長3 低い基材損傷性**
- 特長4 優れた拭取り性**

手が頻繁に触れる環境表面や体液・血液汚れの清掃に 除菌と洗浄が手軽にできるペーパータイプ


使用箇所での使い分けが可能

●塩化ベンザルコニウム(第4級アンモニウム塩)配合



特長1 優れた除菌性能



- 優れた除菌効果を発揮し、効果が持続します。

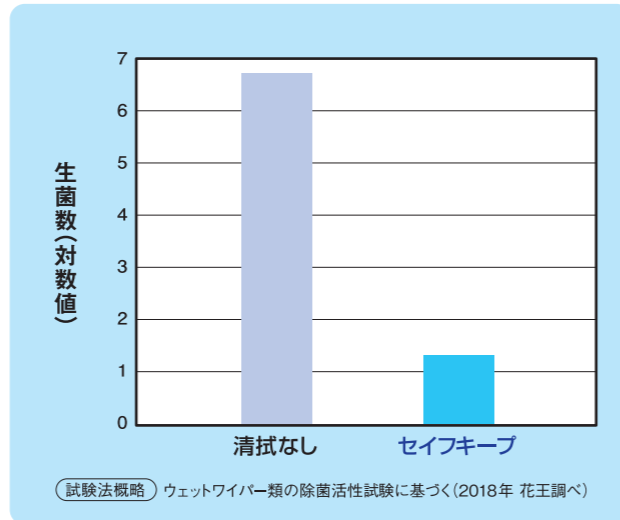

特長2 高い洗浄力

- 洗浄成分(AG^{※1}、AAO^{※2})の働きで、アルコール含浸ペーパーでは落としきれない皮脂汚れから体液・血液汚れまで、しっかり落とします。

※1 アルキルグリコシド ※2 アルキルアミンオキシド

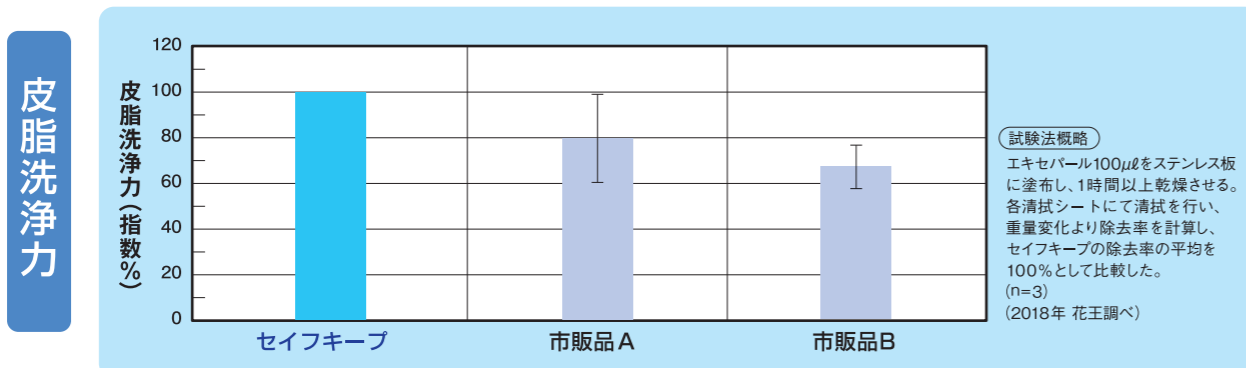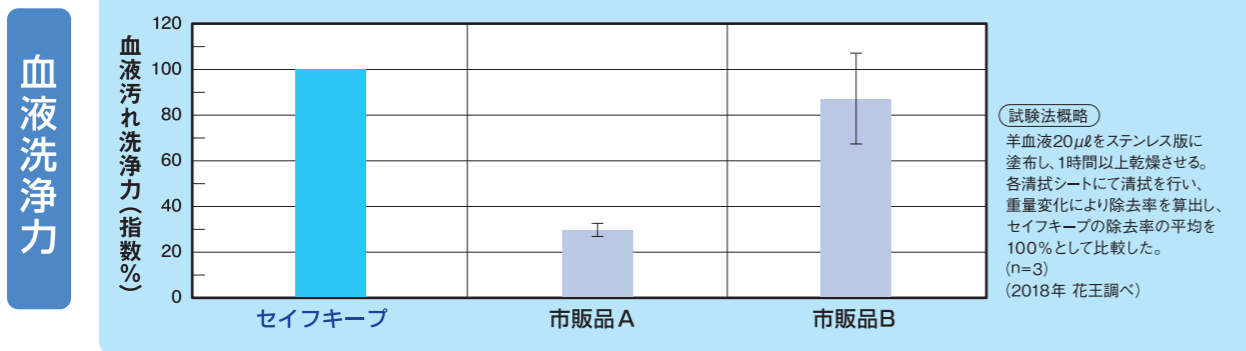

特長3 低い基材損傷性

- 素材にやさしい洗浄成分を配合、ほとんどのプラスチックを傷めません。
- 非塩素系なので臭わず、金属を傷めません。(銅など一部金属を除く)

商品名	アルコールを含まない環境ペーパー		アルコールを含有する環境ペーパー	
	セーフキープ	市販品C	市販品D	市販品E
応力下(24時間接触)				
ポリエチレン	○	○	○	○
ポリプロピレン	○	○	○	○
ポリスチレン	○	○	○	×
アクリル	○	○	×	×
A B S	○	○	○	×

試験法概略 厚さ1mm、幅10mm、長さ70mmの各樹脂製のテスト板に清拭シートを応力下24時間接触させ、テスト板の外観および直角に屈曲させたときの脆さを評価した。(2018年 花王調べ)

特長4 優れた拭取り性

- アルコールを含まないので、ゆっくり乾き、広い面積を拭く事が出来ます。

血液汚れに対する1枚のシートでの清拭可能面積 (相対比較)

