



病院施設用



リリーフ尿とりパッド用ホルダーパンツ

# ぴったりフィットパンツ

排泄ケアを通じて、「安心」をお届けするリリーフから、  
トイレでの排泄に前向きになれるアイテムが登場



- Sサイズ** ウエスト 58~64cm ヒップ 82~90cm
  - Mサイズ** ウエスト 64~70cm ヒップ 87~95cm
  - Lサイズ** ウエスト 69~81cm ヒップ 92~105cm
  - LLサイズ** ウエスト 74~92cm ヒップ 92~115cm
- 品質表示:綿 85%、ポリウレタン 15%



モレ安心  
設計

ズレ防止テープで尿とりパッドがぴったりフィット、  
尿とりパッドのズレを防ぎます。

肌快適  
設計

おなかまわり、脚まわりにゴムを使用していないので、  
締めつけが少ない。


## ● こんな方におすすめです

- ・トイレには行けるけど、時々間に合わないときがある・・・
- ・普通の下着だと、尿とりパッドがズレたりヨレたりする・・・
- ・日中はトイレで排泄、夜は大きなパッドでゆっくり安眠したい・・・



## ● 介護施設での調査結果(使用:ご利用者様、回答:スタッフ様、N=33)

(5段階評価の「良い」、「やや良い」の合計スコア)

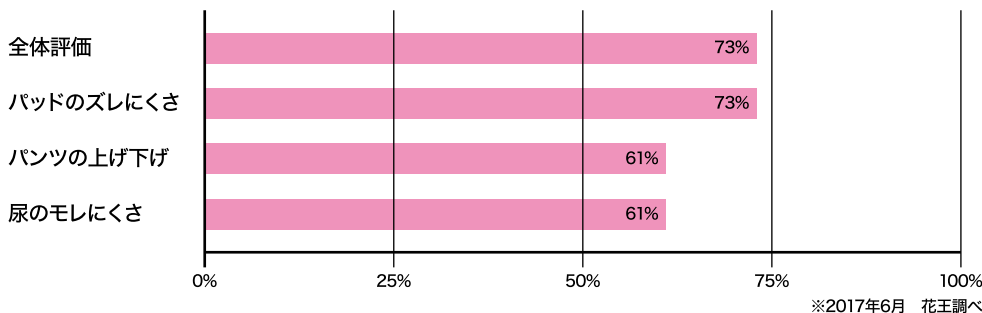

「ズレにくさ」  
について、好評価!!

ご好評の声

- 布パンツが伸びも良くフィットしていた。またご使用になったご本人も「とってもいいですね」との感想でした。
- パッドを入れてもズレなくて良かった。

## ● 使い方(一人ではく場合)

- ① トイレやベッドなどに座ります。パンツの前後を確認し、片足ずつパンツに通します。
- ② 尿とりパッドをぴったりフィットパンツの中に入れます。
- ③ 左右交互にお尻を浮かせながら、パンツを少しずつウエストまで上げます。
- ④ 背中側もウエストまでしっかり上がっていることを確認します。



※介助する方へのお願い

- 背中側もウエストまでしっかり上がっていることを確認
- 股下部分がしっかり上がり、尿とりパッドが股間にフィットしているかを確認してください。

「リリーフパワフル尿とりパッド 2〜7番」まで入ります。

花王プロフェッショナル  
業務改善ナビ  
介護施設  
介護の現場にソリューション

介護施設様の業務改善を  
サポートするWEBサイトのご案内



お役立ち  
コンテンツを  
配信中!

花王プロ 業務改善 🔍 検索

<https://pro.kao.com/jp/medical-kaigo/>

## 目付け・梱内容

品名	目付け(梱内容)	サイズ	寸法(mm)・重量(高さ×幅×奥行)	JANコード
リリーフぴったりフィットパンツ Sサイズ	1枚入り 5枚/梱	ウエスト 58~64cm ヒップ 82~90cm	梱:113×239×159/0.53kg 個:20×230×150/79g	4 901301 351258
リリーフぴったりフィットパンツ Mサイズ		ウエスト 64~70cm ヒップ 87~95cm	梱:113×239×159/0.55kg 個:20×230×150/84g	4 901301 351265
リリーフぴったりフィットパンツ Lサイズ		ウエスト 69~81cm ヒップ 92~105cm	梱:113×239×159/0.61kg 個:20×230×150/96g	4 901301 351272
リリーフぴったりフィットパンツ LLサイズ		ウエスト 74~92cm ヒップ 92~115cm	梱:113×239×159/0.67kg 個:20×230×150/107g	4 901301 369055

商品画像以外の画像に関して、他の印刷物やWEBサイトなどでの無断使用を禁止します。  
この販売レポートに記載したデータ等は、当社調査結果によるものです。

お問い合わせ・ご注文は

花王プロフェッショナル・サービス株式会社

〒131-8501 東京都墨田区文花2-1-3 Tel 03-5630-9283

