

医療施設用 セイフキープ 次亜シート



● 処置室の環境表面に…



10セット/箱



● ベッド柵などの手が触れる環境表面に…



セイフキープ
次亜シート 80枚入



セイフキープ
次亜シート専用液 400mL

各10本
入り

特長1

**専用液をシートに注ぐだけ
気になった時に、すぐに除菌・洗浄**

▶ 毎日、次亜の濃度調整する必要はありません
シートに専用液を含浸させてから2週間を目安にお使いください

特長2

皮脂汚れから血液汚れまで洗浄可能

▶ 洗浄成分配合で、気になる汚れの洗浄ができます

特長3


柔らかな独自シート採用

▶ 厚みがあり柔らかいシートが、環境表面の凸凹にフィットし、スムーズに清拭作業ができます

洗浄性能

- 洗浄成分配合で、除菌と同時に血液汚れの洗浄もできます。

洗浄性能(血液汚れモデル)

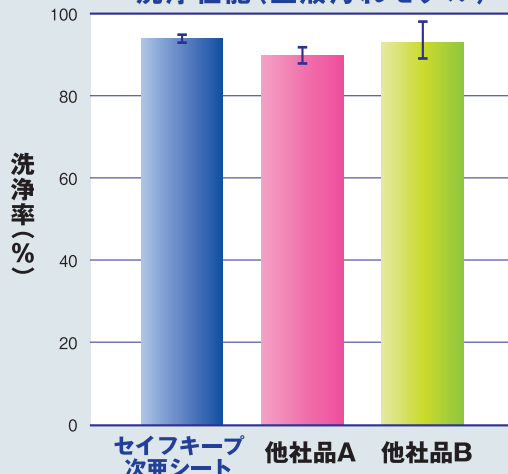


【試験条件】血液汚れモデル(ヘパリン処理羊+1%硫酸プロタミン溶液)を付着させたSUS板上に、試験シートサンプル片を置き、一定加重下にて往復運動させた後、汚れの重量変化にて洗浄率を測定した。(n=3) (2018年3月 花王調べ)

シート材質


- 厚みがあり、柔らかいシートが、環境表面の凸凹にフィットし、スムーズに清拭作業ができます。

厚み

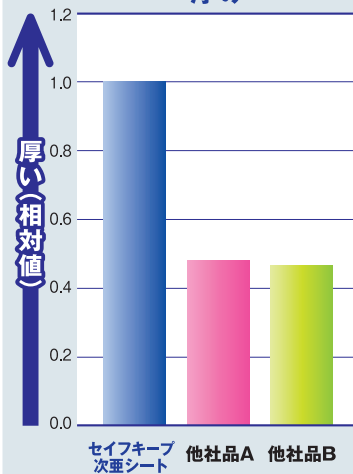

【試験条件】セーフキープ次亜シートの20g荷重時の厚みを1.0として、相対値を算出した。(n=1) [一般不織布試験方法JIS L 1913に準拠] (2018年2月 花王調べ)

柔らかさ

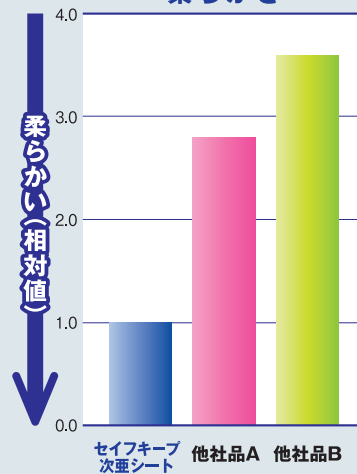

【試験条件】セーフキープ次亜シートの横方向における10%伸長時荷重を1.0として、相対値を算出した。(n=1) [一般不織布試験方法JIS L 1096に準拠] (2018年2月 花王調べ)

※専用液を注ぐ時は、専用液ボトルを下記絵③の向きにする。(向きが違くと液がはねることがあります。)

ご使用の手順



① 保護メガネ・マスク・手袋などを必ず着用する。



② キャップを回して開ける。



③ 専用液をロールの中央部にゆっくりと全量注ぐ。



④ ロール中央部からシートの先端をつまみ上げる。



⑤ シートの先端をキャップ中央の穴に内側から外側に通す。



⑥ キャップをしっかり閉めてから使用する。使用後は必ずフタを閉める。

用途・使い方

●医療従事者・患者の手の接触面(ドアノブ、手すり、ベッド柵、機器外装など)
●処置室・ICU(集中治療室)・手術室・フロア・トイレなどの床
●拭き取った面は充分乾燥させ、必ず水拭きする ●使用後は必ずフタを閉める

使えないもの

●ステンレス以外の金属製品
●液晶パネル ●水がしみ込む白木・壁材・家具類
●ポリカーボネート ●電子機器類、各種樹脂などは目立たない部分で影響がないことを確認してから使用する

使用上の注意

●用途外に使わない。●作業時は、保護メガネ・マスク・手袋などを必ず着用する。また、液はねに注意し、周囲に人がいないことを確認する。●手、顔など身体や食器類などに使用しない。●水に溶けないので、トイレに流さない。●他の洗浄剤と併用しない。酸素系漂白剤と併用すると効果が落ちる。●直射日光を避け、高温の所に置かない。●子供の手の届く所に置かない。●認知症の方などの誤食や他の事故を防ぐため、置き場所に注意する。●使用後はシートの乾燥を防ぐため、必ずフタを閉める。●機器などに使用の場合は、機器の取り扱い説明書に従う。●酸性タイプの製品や塩素化イソシアヌル酸(排水口ヌメリ取り剤など)と混ぜないようにする。アルコール製剤と併用しない。有害なガスが発生して危険。●衣類や敷物、家具に付着すると脱色するので注意する。●ワックスを塗布した床面には、ワックスがはがれるので使用しない。●体調が悪い時は使わない。●他の容器に移して使用しない。●清拭後の環境表面は充分乾燥させ、必ず水拭きする。●倒して保管しない。●使い終わった容器は水で洗ってから廃棄する。

梱内容

品名	目付 梱内容	サイズ(mm)・重量 (高さ×幅×奥行)	JANコード
セーフキープ 次亜シート	10セット/梱 (シート 80枚入 10本 + 専用液 400 mL 10本) ※梱販売のみ	梱 194×530×335 7.2kg	4 901301 357267

商品写真以外の画像に関して、他の印刷物やWEBサイトなどでの無断使用を禁じます。

※この販売レポートに記載したデータ等は、当社調査結果によるものです。セーフキープは花王の商標です。

お問い合わせ・ご注文は

花王プロフェッショナル・サービス株式会社

〒131-8501 東京都墨田区文花 2-1-3 ☎03(5630)9283

