

医療施設用

泡洗浄ハイター-1000

(除菌洗浄剤)

汚染された環境表面の
洗浄・除菌に



400 mL

商品特長

- 1 泡がすばやく密着する除菌洗浄剤です。
- 2 汚染された環境表面に次亜塩素酸ナトリウムの泡で出て飛散しません。
- 3 希釈不要ですぐに使えます。次亜塩素酸ナトリウムが汚れに浸透。しっかり除菌します。

こんな場面でお使い下さい。

血液汚れに



●透析室・血管造影室

ベッド替え時の
洗浄・除菌に



●病室

環境表面の洗浄・除菌に



●手すり・ドアノブ


(吐物などで)
汚染された環境表面に



●廊下・病室

洗浄性能

●血液洗浄率

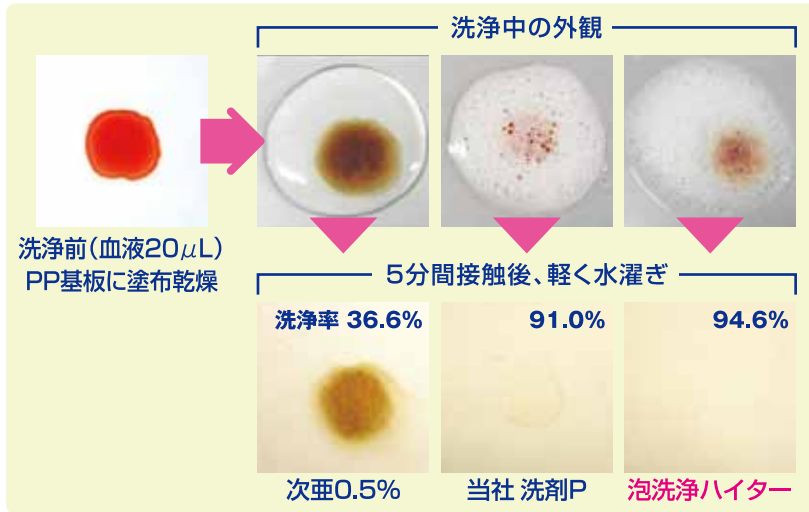


血液汚れ…ヒツジ血液20 μ L(ヘパリン添加後、PP基板に塗布して乾燥)

※洗浄率:塗布した汚れの重量の変化により算出

【(洗浄前-洗浄後)÷洗浄前×100】

●油汚れ洗浄率

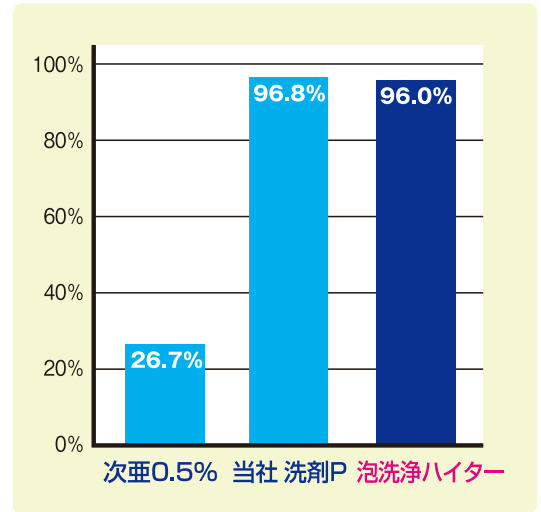


油汚れ…中鎖脂肪酸トリグリセリド20mL

(スダン皿で着色、PP基板に塗布して乾燥)

洗浄方法 油汚れに対して1mLで処理 5分間静置後少量の水で濯ぎ

ユーザー評価

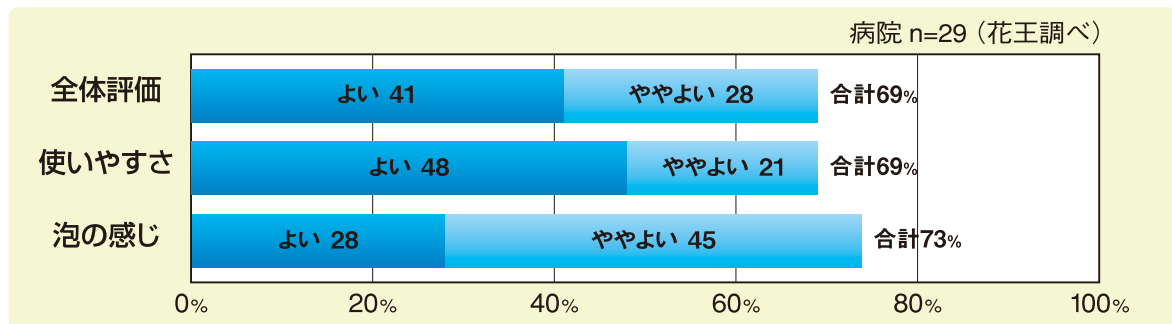

- 汚れがよく落ちる。
- 洗浄成分が入っているので、汚れが落ちやすい。
- (洗浄剤が)よくのびるし、液だれしないので効果的だと思う。
- ピンポイントにスプレーでき、血液が除ける。
- 希釈せずに使用できるので便利。
- 泡なので飛散せず、使用しやすい。
- 泡立ちがよくて液だれが少ない。

●目付け・梱内容

品名	目付け 梱内容	サイズ(mm)・重量 (高さ×幅×奥行)	JANコード
医療施設用 泡洗浄ハイター1000	400mL 12本	個: 211×100×58 486g 梱: 226×360×210 6.2kg	4 901301 509321

商品写真以外の画像に関して、他の印刷物やWEBサイトなどでの無断使用を禁じます。

※この販売レポートに記載したデータ等は、当社調査結果によるものです。

お問い合わせ・ご注文は

花王プロフェッショナル・サービス株式会社

〒131-8501 東京都墨田区文花 2-1-3 ☎03(5630)9283

